


COMMENT

Comprendre et modifier les paramètres

Paramètres


Mon profil

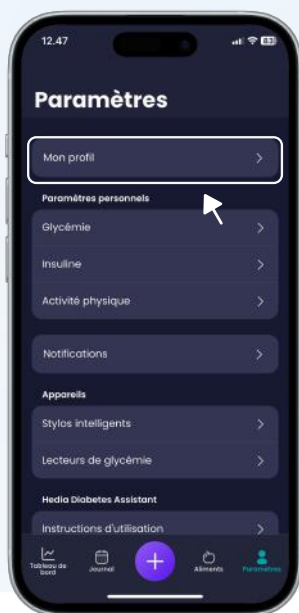

Cliquez sur "Mon profil"




Ici, vous pouvez voir la date de naissance, le type de diabète, le sexe biologique, la taille et le poids.

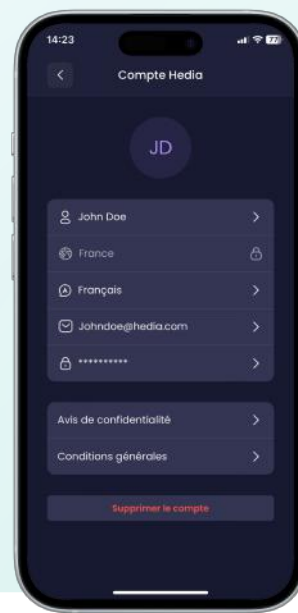

Dans 'Compte', vous trouverez votre nom, email, mot de passe, langue et pays.

Paramètres de la glycémie

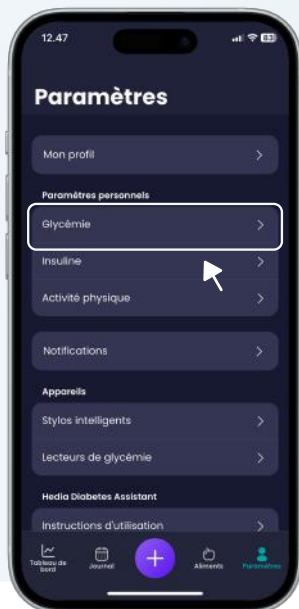

Sélectionnez 'Glycémie'




L'unité de glycémie peut être définie sur mmol/L ou mg/dL.

'Objectif fixe' : Votre objectif de glycémie est le même tout au long de la journée.



'Objectif variable' : Choisissez des objectifs de glycémie spécifiques pour des périodes précises de la journée.

Paramètres de l'insuline

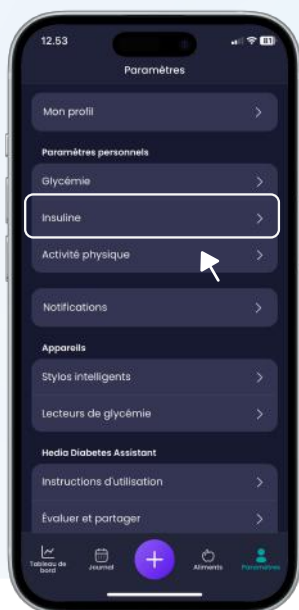

Sélectionnez "Insuline"



Voir et modifier le type de traitement :
Réglage fixe de l'insuline : Votre ratio insuline/glucides et votre sensibilité à l'insuline restent constants tout au long de la journée.



Réglage d'insuline variable : Choisissez des "Rapports insuline/glucides" et des "Sensibilités à l'insuline" spécifiques pour différentes périodes de la journée.

Paramètres d'activité physique




Sélectionnez 'Activité physique'



Changez votre objectif glycémique souhaité durant l'activité physique. Pour 'Commencer maintenant' et

'Terminé récemment', ajustez le pourcentage de réduction selon la durée et l'intensité.

Notifications

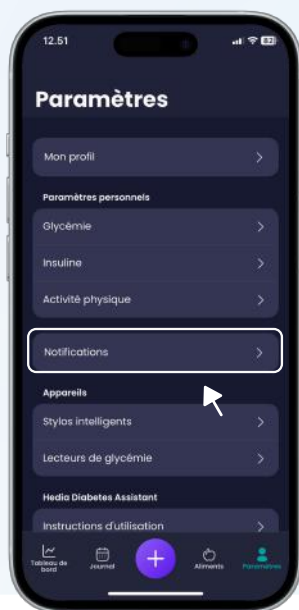


Sélectionnez 'Notifications'



"Rappel de prise de médicament" :
Rappel quotidien pour prendre votre médicament, à l'heure que vous avez choisie.


"Temps pour re-mesurer" :
Re-mesurez votre glycémie entre une demi-heure et 6 heures après la recommandation.

Appareils

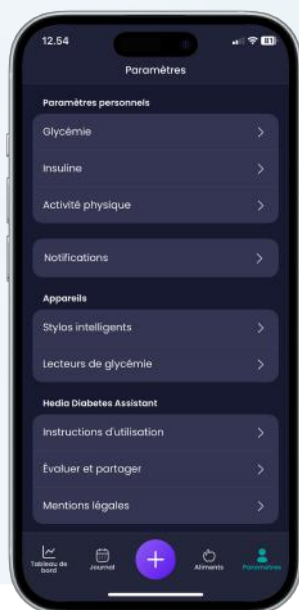


Connectez-vous aux stylos connectés et aux lecteurs de glycémie.

(La disponibilité des appareils peut varier en fonction du pays et de la plateforme.)

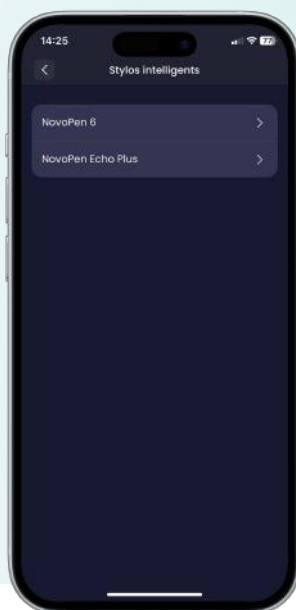


Connectez-vous aux stylos intelligents.

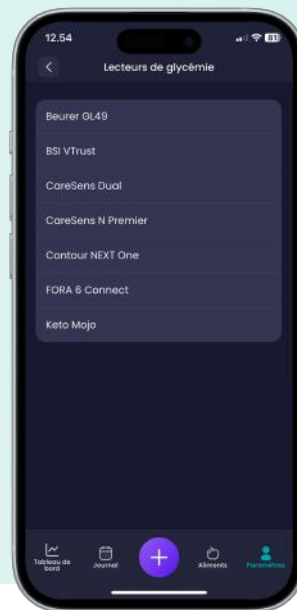

Connectez-vous aux lecteurs de glycémie..

Hedia Assistant Diabetes

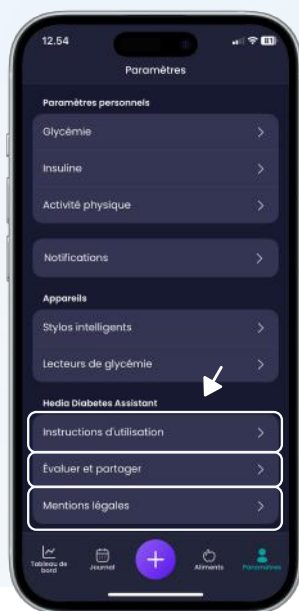

Instructions d'utilisation, Évaluer et partager, Mentions légales



Instructions d'utilisation: Manuel complet



Évaluez et partagez l'application.



Mentions légales : Consultez les informations sur le fabricant, la date de production et les informations réglementaires.