


COMMENT


Comprendre et modifier les paramètres

Paramètres

Mon profil

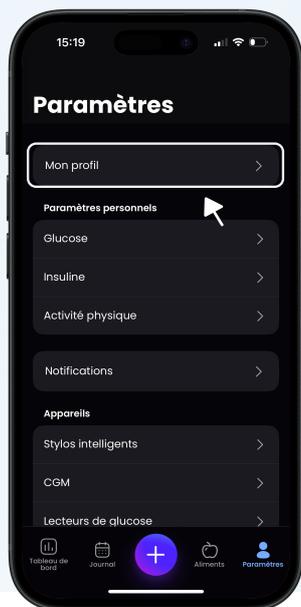

Cliquez sur « Mon profil ».

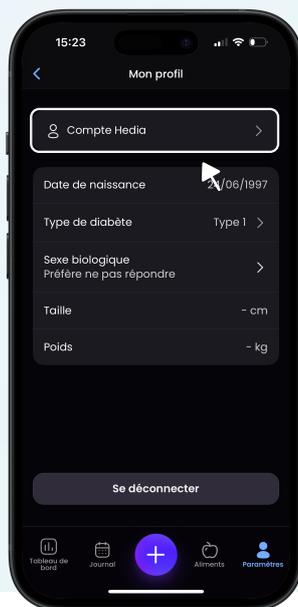


Ici, vous pouvez voir la date de naissance, le type de diabète, le sexe biologique, la taille et le poids.



Dans « Compte », vous trouverez votre nom, email, mot de passe, langue et pays.

Paramètres de la glycémie

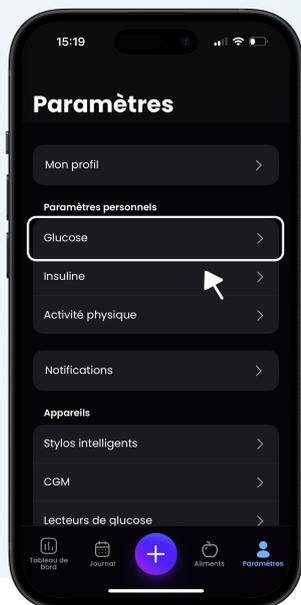


Sélectionnez « Glucose ».




L'unité de glycémie peut être définie sur mmol/L ou mg/dL.

'Objectif fixe' : Votre objectif de glycémie est le même tout au long de la journée.

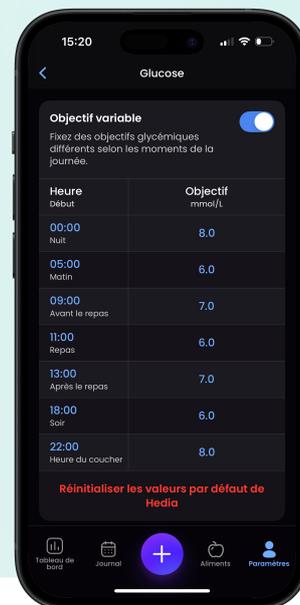

'Objectif variable' : Choisissez des objectifs de glycémie spécifiques pour des périodes précises de la journée.

Paramètres de l'insuline

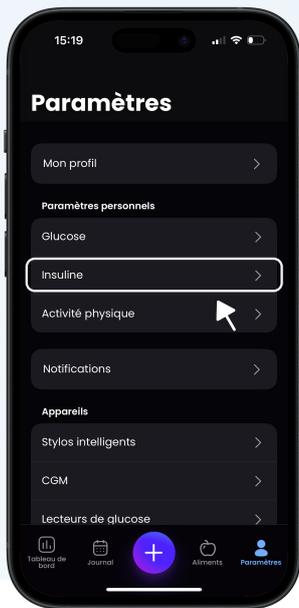

Sélectionnez « Insuline ».




Voir et modifier le type de traitement :
Réglage fixe de l'insuline : Votre ratio insuline/glucides et votre sensibilité à l'insuline restent constants tout au long de la journée.



Réglage d'insuline variable : Choisissez des rapports insuline/glucides et des sensibilités à l'insuline spécifiques pour différentes périodes de la journée.

Paramètres d'activité physique

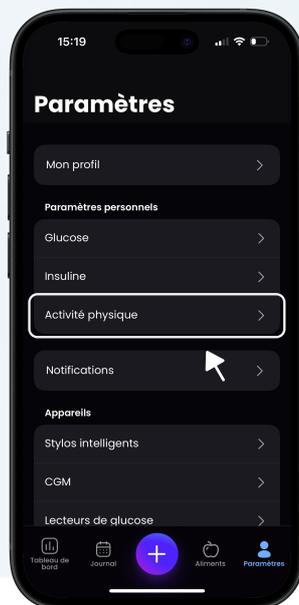


Sélectionnez « Activité physique ».



Changez votre objectif glycémique souhaité durant l'activité physique. Pour « Commencer maintenant » et « Terminé récemment », ajustez le pourcentage de réduction selon la durée et l'intensité.

Notifications

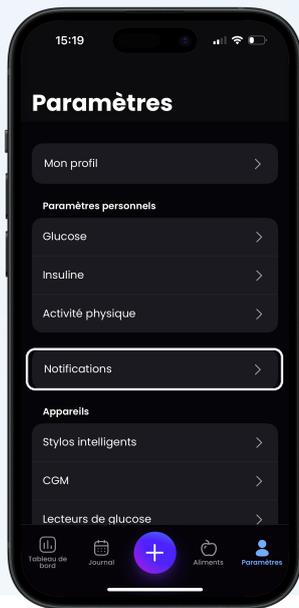


Sélectionnez « Notifications ».



« Rappel de prise de médicament » : Rappel quotidien pour prendre votre médicament, à l'heure que vous avez choisie.


« Temps pour re-mesurer » : Re-mesurez votre glycémie entre une demi-heure et 6 heures après la recommandation.

Appareils

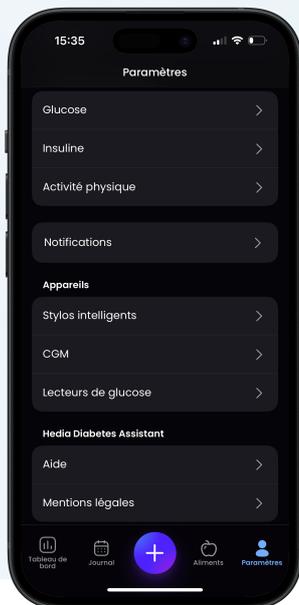


Connectez-vous aux stylos connectés, capteur CGM et aux lecteurs de glycémie.

(La disponibilité des appareils peut varier en fonction du pays et de la plateforme.)

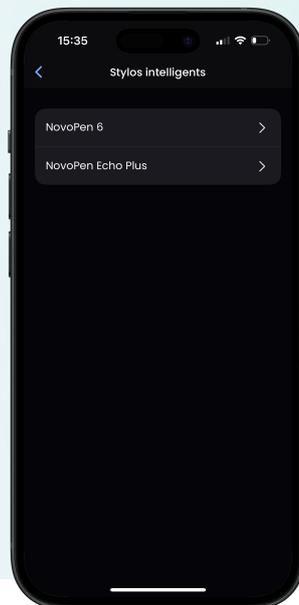


Connectez-vous aux stylos intelligents.

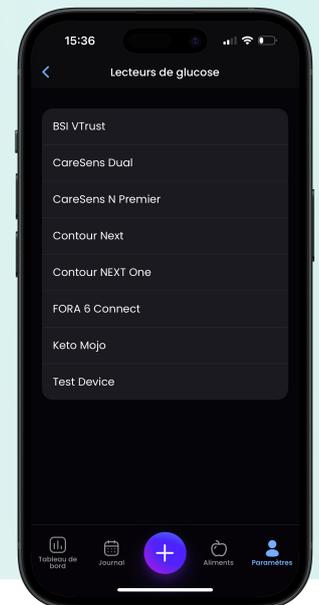

Connectez-vous aux lecteurs de glycémie..

Dexcom

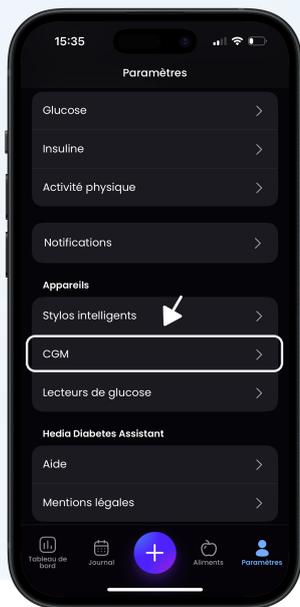

Connectez votre capteur CGM Dexcom.



Les données de votre capteur CGM sont ransmises à Hedia Diabetes Assistant avec un delai de 3 heures.



Hedia n'envoie pas d'alertes liées au taux de glucose.



Lisez et acceptez les « Information de sécurité ».




Appuyez sur « Se connecter avec Dexcom ».



Connectez-vous à votre compte Dexcom.


Hedia Assistant Diabetes

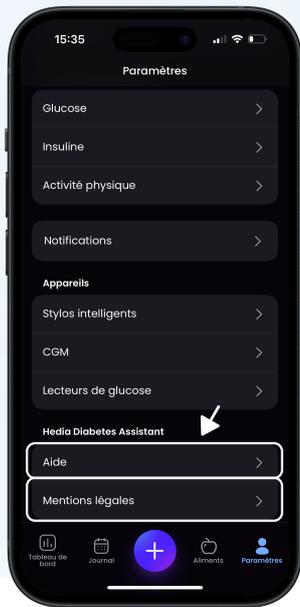

Aide, Mentions légales



Mentions légales : Consultez les informations sur le fabricant, la date de production et les informations réglementaires.

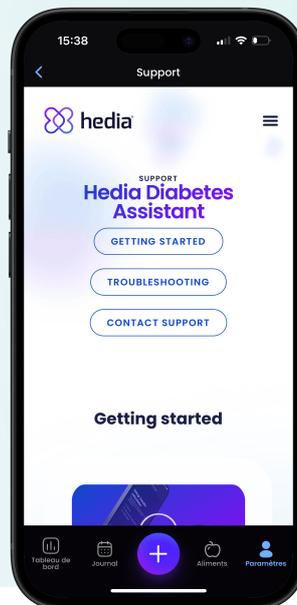

Accédez à la page d'assistance en ligne



Instructions d'utilisation: Manuel complet